

L'EXCELLENCE du nettoyage Par ULTRASONS



YSONIC
GAMASONIC - France

Laveurs Automatiques par Ultrasons SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7

Performance - Efficacité - Sécurité



Versions sous plan de travail (tiroir électrique)

Les Laveurs automatiques SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7
bénéficient de la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour

Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher

l'instrumentation réutilisable au cabinet dentaire

Exemples de configuration pour répondre à vos applications :




SNC Slide 17K7

Instrumentation classique
1 x Panier P12
Capacité ≈ 20 patients




SNC Slide 17K7

Instrumentation cassette
1 x Panier PC17
24 Cassettes (4 instruments)
12 Cassettes (10 instruments)
6 Cassettes (20 instruments)

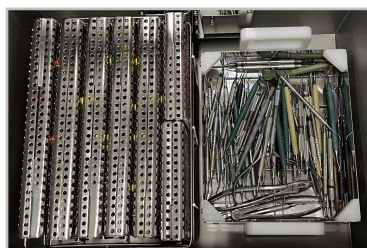

SNC Slide 30K7

Instrumentation classique
2 x Panier P12
Capacité ≈ 40 patients

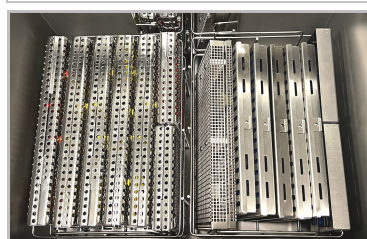

SNC Slide 30K7

Instrumentation cassette
2 x Panier PC17
48 Cassettes (4 instruments)
24 Cassettes (10 instruments)
12 Cassettes (20 instruments)

Les Laveurs Automatiques SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7 (ISO 15883-1-5)

- Conçus pour aseptiser l'instrumentation médico-chirurgicale réutilisable au cabinet dentaire
- Installation sous plan de travail (largeur module de meuble = 60 cm)
- Dispositifs Médicaux CE validés ISO 15883-1-5.
- 2 capacités de cuves :
 - **17L. K7 / 30L. K7** : Instrumentation classique (vrac) **ET** Cassettes
- Gamme complète d'ustensiles pour répondre à vos applications :
Panier instrumentation classique / Panier cassette / Panier porte-plateaux




P3



P12



PC17

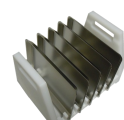

PPL 17

Cycle OUVERTURE / FERMETURE du tiroir

- Automatisée (électrique) via une impulsion sur bouton poussoir :
« Ouverture/Fermeture »

Cycle PRÉDÉSINFECTION PANIER ou CASSETTE:

- Remplissage en eau claire + Dosage du détergent DETERBAKT®

Cycle AUTOMATIQUE PANIER ou CASSETTE: :

- Rinçage en eau claire sous ultrasons
 - Nettoyage sous ultrasons avec détergent « Nettoyant »
 - Rinçage en eau claire sous ultrasons
 - Rinçage en eau claire sous ultrasons avec détergent « Rinçant »
 - Séchage par air chaud
- Cycle PANIER ≈ 60 minutes - Cycle CASSETTE ≈ 75 minutes

Laveurs Automatiques SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7

Reproductibilité	✓ Cycle Automatique
Technologie de nettoyage	✓ CAVITATION Ultrasonore (Immersion) Pas de Zones d'ombres
Manipulation Instrumentation souillée Risque Accident Exposition au Sang	✓ Pas de manipulation (Paniers dédiés) Aucun risque
Chargement & Déchargement de l'appareil	✓ RAPIDE & SECURISÉ
Ouverture / Fermeture du tiroir	✓ ÉLECTRIQUE

COMPATIBILITE PRODUITS DETERGENTS GAMASONIC :

Les performances des appareils SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7 sont atteintes exclusivement avec l'utilisation des produits DETERBAKT® (Nettoyant-Désinfectant), PROCLEAN (Nettoyant) et DPH21 (Produit Rinçant) de GAMASONIC.



DETERBAKT®



PROCLEAN



DPH21

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les appareils SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7 sont des dispositifs médicaux destinés à l'asepsie de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (Professionnel de santé).

Les appareils SNC Slide 17K7 - SNC Slide 30K7 ne se substituent pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ne jamais disposer l'instrumentation médico-chirurgicale sans panier dans la cuve

Ne jamais lancer un cycle ULTRASON sans eau.

Remplir la cuve en eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH)

Lire la documentation technique de l'appareil avant toute utilisation.