

L'EXCELLENCE du nettoyage
par ULTRASONS




YSONIC
GAMASONIC - France

SNC Digital

LAVEURS-DESINFECTEURS automatiques par Ultrasons



AUCUNE MANIPULATION DE L'INSTRUMENTATION SOUILLÉE

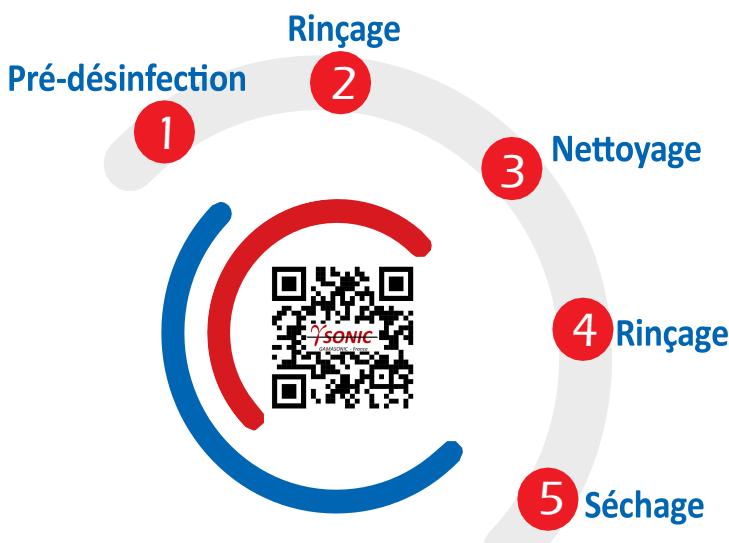

Les Laveurs-Désinfecteurs de la gamme SNC Digital (ISO 15883-1-5)

Exemples de configuration pour répondre à vos applications :




Instrumentation classique
SNC17-ED avec Panier P12



Instrumentation cassette
SNC17-EDK7 avec Panier PC17




Instrumentation classique
SNC30-ED avec 1 P12 + 2 P3

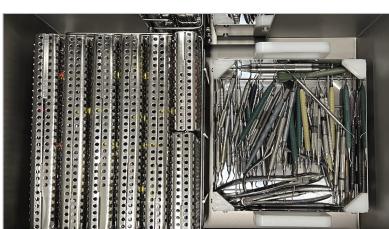

Instrumentation mixte
SNC30-EDK7 avec 1 P12 + 1 PC17

- Conçus pour aseptiser l'instrumentation médico-chirurgicale réutilisable au cabinet dentaire
- Dispositifs Médicaux CE de classe IIb validés ISO 15883-1-5.
- Plusieurs Modèles disponibles : **Encastrable - Table - Meuble**
- 4 capacités de cuves :
 - **17L / 30L** : Instrumentation classique (vrac)
 - **17L K7 / 30L K7** : Instrumentation classique (vrac) **ET** Cassettes
- Gamme complète d'ustensiles pour répondre à vos applications :
Panier instrumentation classique / Panier cassette / Panier porte-plateaux Bécher fraise / Bécher gradué / Support bécher

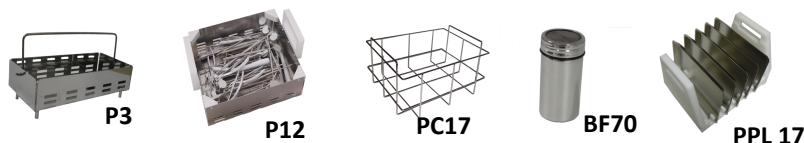

Cycles MANUELS :

- Remplissage en eau claire
- Ultrasons
- Vidange
- Séchage



Cycle PRÉDÉSINFECTION :

- Remplissage en eau claire + Dosage du détergent DETERBAKT®

Cycle AUTOMATIQUE :

- Rinçage en eau claire sous ultrasons
- Nettoyage sous ultrasons avec le détergent PROCLEAN
- Rinçage en eau claire sous ultrasons
- Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le détergent DPH21
- Séchage par air chaud

Cycle PANIER ≈ 55 minutes - Cycle CASSETTE ≈ 75 minutes

| Laveurs-Désinfecteurs SNC Digital | |
|---|---|
| Reproductibilité | ✓ Cycle Automatique |
| Technologie de nettoyage | ✓ CAVITATION Ultrasonore (Immersion) Pas de Zones d'ombres |
| Manipulation Instrumentation souillée Risque Accident Exposition au Sang | ✓ Pas de manipulation (Paniers dédiés) Aucun risque |
| Chargement & Déchargement de l'appareil | ✓ RAPIDE & SECURISÉ |

COMPATIBILITE PRODUITS DETERGENTS GAMASONIC :

Les performances des appareils de la gamme **SNC Digital** sont atteintes exclusivement avec l'utilisation des produits DETERBAKT® (Nettoyant-Désinfectant), PROCLEAN (Nettoyant) et DPH21 (Produit Rinçant) de GAMASONIC.



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'appareil SNC Digital est un dispositif médical destiné à l'asepsie de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (Professionnel de santé).

L'appareil SNC Digital ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ne jamais disposer l'instrumentation médico-chirurgicale sans panier dans la cuve

Ne jamais lancer un cycle ULTRASON sans eau.

Remplir la cuve en eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH)

Lire la documentation technique de l'appareil avant toute utilisation.